

PHYSIOMER®

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer

PHYSIOMER® est une gamme de produits de soin pour le nez à l'eau de mer naturelle.

PHYSIOMER® Baby Isotonic

Spray nasal

Hygiène - Prévention active

Embout confort®

A partir de 15 jours

115 mL e

A SAVOIR AVANT D'UTILISER PHYSIOMER® Baby Isotonic

- L'utilisation par plus d'une personne peut transmettre l'infection.
- En cas d'irritations nasales, des picotements temporaires peuvent apparaître lors de l'utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage n'a plus son apparence d'origine.
- Ne pas utiliser le produit s'il est cassé ou endommagé.
- Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours, consultez un professionnel de santé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Propriétés

- Nettoie et dégage les voies nasales en cas de nez encombré
- Humidifie les voies nasales
- Prévient du risque d'infections secondaires et d'otites

100% naturel

- Eau de mer isotonique
- Sans conservateur
- Adapté à un usage quotidien

INGREDIENTS

Solution d'eau de mer 100% naturelle, non diluée et isotonique (équivalent à 9 g/l en NaCl). Stérile et sans conservateur.

UTILISATION

Recommandation d'utilisation

- En traitement des symptômes du nez, en cas de rhume ou de rhinopharyngite : 4 à 6 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.
- En utilisation quotidienne, en hygiène et prévention des infections nasales : 1 à 2 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.

Mode d'administration

Il est recommandé de procéder au lavage nasal avant de nourrir bébé, quand l'enfant est éveillé et calme.

Coucher le bébé sur un lit légèrement incliné (30°) avec la tête sur le côté (jamais en arrière afin d'éviter le risque de fausse route dans la gorge).

Vaporisez une partie de la solution sur votre main pour vérifier que la température est correcte et vous habituer à la pression qu'elle produit.

Vous pouvez également vaporiser sur la main de bébé pour le rassurer.

Avant utilisation : vérifier que le dispositif fonctionne normalement.

- 1 - Insérer doucement l'embout dans la narine supérieure et exercer une pression ferme pendant 1-2 secondes. Laisser la solution agir pendant quelques secondes.
- 2 - Répéter dans l'autre narine.
- 3 - Relever le bébé et lui essuyer le nez ou utiliser un mouche-bébé.



Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation puis bien le sécher.