

PHYSIOMER®

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer

PHYSIOMER® est une gamme de produits de soin pour le nez à l'eau de mer naturelle.

PHYSIOMER® Kids

Spray nasal

Hygiène - Prévention active

A partir de 2 ans

115 mL e

Propriétés

- Elimine l'excès de mucosités en cas de rhume
- Nettoie et humidifie le nez
- En utilisation régulière prévient la récurrence du rhume et le risque d'infections secondaires et d'otites

100% naturel

- Eau de mer isotonique
- Sans conservateur
- Adapté à un usage quotidien

A SAVOIR AVANT D'UTILISER PHYSIOMER® Kids

- L'utilisation par plus d'une personne peut transmettre l'infection.
- En cas d'irritations nasales, des picotements temporaires peuvent apparaître lors de l'utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage n'a plus son apparence d'origine.
- Ne pas utiliser le produit s'il est cassé ou endommagé.
- Si les symptômes persistent au-delà de 5 jours chez les bébés et 10 jours chez les adultes et enfants, consultez un professionnel de santé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

INGREDIENTS

Solution d'eau de mer 100% naturelle, non diluée et isotonique (équivalent à 9 g/L en NaCl). Stérile et sans conservateur.

UTILISATION

Recommandation d'utilisation

- En traitement des symptômes du nez, en cas de rhume (nez qui coule et/ou bouché) ou de grippe: 4 à 6 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.
- En usage quotidien, en hygiène et prévention : 1 à 2 fois par jour, pulvériser 1 à 2 secondes dans chaque narine.

Mode d'administration

Adultes et enfants : La présence d'un adulte est recommandée en cas d'utilisation par l'enfant.

Avant utilisation : vérifier que le dispositif fonctionne normalement.

- 1 - Pencher la tête sur un côté. Insérer doucement l'embout dans la narine supérieure et exercer une pression ferme pendant 1-2 secondes. Laisser la solution agir pendant quelques secondes.
- 2 - Répéter dans l'autre narine.
- 3 - Se moucher.



Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation puis bien le sécher.