

# PHYSIOMER®

Toute la richesse de l'eau de mer pour mieux respirer

PHYSIOMER® est une gamme de produits de soin pour le nez à l'eau de mer naturelle.

## PHYSIOMER® Strong Jet

### Spray nasal

Hygiène - Prévention active

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

210 mL e

### Propriétés

- Nettoie les voies nasales et aide à rétablir la respiration
- Améliore la récupération après une chirurgie
- Prévient les infections secondaires des oreilles, du nez et de la gorge

### 100% naturel

- Eau de mer isotonique
- Sans conservateur
- Adapté à un usage quotidien

### A SAVOIR AVANT D'UTILISER PHYSIOMER® Strong Jet

- L'utilisation par plus d'une personne peut transmettre l'infection.
- En cas d'irritations nasales, des picotements temporaires peuvent apparaître lors de l'utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
- Ne pas utiliser si l'emballage n'a plus son apparence d'origine.
- Ne pas utiliser le produit s'il est cassé ou endommagé.
- Si les symptômes persistent au-delà de 10 jours chez les adultes et enfants, consultez un professionnel de santé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### INGREDIENTS

Solution d'eau de mer 100% naturelle, non diluée et isotonique (équivalent à 9 g/l en NaCl).  
Stérile et sans conservateur.

### UTILISATION

#### Recommandation d'utilisation

- En cas de croûtes ou de sécrétions nasales épaisses, collantes et purulentes: 1 à 4 pulvérisations par jour dans chaque narine.
- En cas de gêne nasale chronique, pathologies rhinosinusiennes et dans les suites de chirurgie endonasale et endosinuales : 1 à 4 pulvérisations par jour dans chaque narine, quand déterminé par un médecin.

#### Mode d'administration

Adultes et enfants : La présence d'un adulte est recommandée en cas d'utilisation par l'enfant.

Avant utilisation : vérifier que le dispositif fonctionne normalement.

- 1 - Pencher la tête sur un côté. Insérer doucement l'embout dans la narine supérieure et exercer une pression ferme pendant 1-2 secondes. Laisser la solution agir pendant quelques secondes.
- 2 - Répéter dans l'autre narine.
- 3 - Se moucher.



Rincer l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation puis bien le sécher.